

BENÖTIGTE MENGE KONZENTRAT ZUR ERSTELLUNG EINER LÖSUNG

LÖSUNG	0.25%	0.5%	1%	1.5%	2%	3%	4%
1 L	2.5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml
2 L	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml
3 L	7.5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml
4 L	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml
5 L	12.5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml
8 L	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml
10 L	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml
16 L	40 ml	80 ml	160 ml	240 ml	320 ml	480 ml	640 ml
20 L	50 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml

Anwendungshinweise:

10 Liter: 1%igen Anwendungslösung = 100 ml Desinfektionsmittel + 9.9 Liter Wasser

Wasser vorlegen. Dem Wasservolumen entsprechende Menge Desinfektionsmittelkonzentrat zudosieren, kurz umrühren. Lösung ist sofort einsatzbereit.

Gem. RKI-Empfehlung Desinfektionsmittellösungen arbeitstäglich wechseln. Die Lösung in sauberen, abgedeckten Gefässen (Instrumentenwannen oder Vorratsgebinde) lagern.