

TABLEAU DE DOSAGE



QUANTITÉ DE CONCENTRÉ NÉCESSAIRE POUR PRÉPARER UNE SOLUTION							
SOLUTION	0.25%	0.5%	1%	1.5%	2%	3%	4%
1 L	2.5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml
2 L	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml
3 L	7.5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml
4 L	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml
5 L	12.5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml
8 L	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml
10 L	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml
16 L	40 ml	80 ml	160 ml	240 ml	320 ml	480 ml	640 ml
20 L	50 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml

Conseil d'utilisation:

10 Liter: Solution d'application à 1% = 100 ml de produit de désinfection + 9.9 litres d'eau

Préparer l'eau. Ajouter le concentré de désinfectant dans la quantité correspondant au volume d'eau, remuer brièvement. La solution est immédiatement prête.

Selon la recommandation du RKI, il faut changer les solutions désinfectantes tous les jours. Conservez la solution dans des récipients propres et couverts (plateaux d'instruments ou récipients de stockage).